

# 鼻腔カニューレV



再使用禁止

D1

## 【禁忌・禁止】

### <使用方法>

- ・再使用禁止


## 【形状・構造及び原理等】

### 1. 構成品

- (1)鼻カニューレ  
カタログ番号：3010484(成人用)、3011507(小児用)
- (2)二股鼻カニューレ  
カタログ番号：3010485(成人用)、3011508(小児用)  
※アダプタを付属する。アダプタは酸素供給機器との接続時に、接続部(酸素用)に接続して使用する場合があります。


### 2. 構造図

#### (1)鼻カニューレ

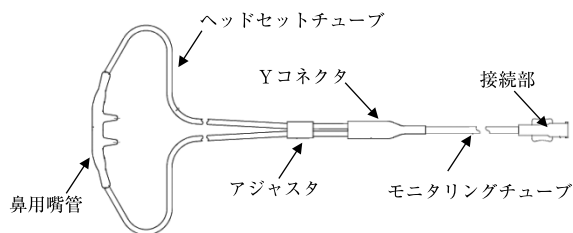

鼻用鼻管材質：ポリ塩化ビニル

#### (2)二股鼻カニューレ

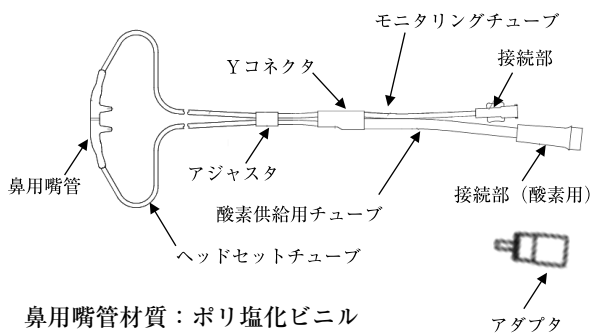

鼻用鼻管材質：ポリ塩化ビニル

### 3. 原理

酸素供給機器から本品を通過して患者へ酸素を供給し、また患者の呼気から二酸化炭素を収集する。二酸化炭素の収集のみに用いる場合もある。

## 【使用目的又は効果】

本品は、外鼻孔経由で酸素を供給するとともに呼気から二酸化炭素を収集するために用いる、又は、二酸化炭素の収集のみに用いるカニューレである。

## 【使用方法等】

### 1. 組み合わせて使用する医療機器

MR室用患者モニタVeris  
(承認番号：21900BZY00030000)

### 2. 使用方法

- (1)鼻用鼻管が患者の鼻腔に位置するよう、本品を患者の鼻下に装着する。
- (2)ヘッドセットチューブを患者の耳にかけ、アジャスタをスライドさせることで、頭周りにループを作りながら長さを調節する。

(3)本品の接続部をサンプルラインに接続する。

(4)酸素供給用チューブを有している場合には、接続部(酸素用)を酸素供給機器に接続する。

## 【使用上の注意】

### <重要な基本的注意>

- ・本品を含むガスモニタリングラインを引っ張る、つまむ、巻き上げる等しないこと。

## 【保管方法及び有効期間等】

### <有効期間>

3年[自己認証による]

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

バイエル薬品株式会社

TEL:06-6133-6250 FAX:06-6344-2395

外国製造業者

ソルターラブ社(Salter Labs) (米国)