

メドラッド 造影用耐圧チューブ



D2

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止


【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品はシリンジ及びカテーテル等に接続するための接続部とチューブで構成されている。

カタログ番号	全長
TAG C50 HPCT	508mm
TAG C75 HPCT	762mm
TAG C120 HPCT	1219mm
TAG C150 HPCT	1524mm

2. 構造図

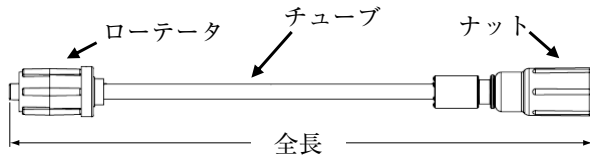

チューブ材質：ポリアミド

ナット材質：ポリカーボネート

*ローテータ材質：ポリカーボネート、N-ブチルラバー

3. 仕様

耐圧性能：1200psi

【使用目的又は効果】

血管造影の際に用いる耐圧性のあるチューブである。

【使用方法等】

1. 組み合わせて使用する医療機器

アンギオ用血管造影シリンジ

(届出番号：27B1X00106000011)

カタログ番号：TAG 150 SYR

2. 使用方法

- (1)パッケージから本品を取り出す。
- (2)本品のナット部をシリンジの先端に接続する。ナットを時計回りに回し、シリンジの先端にしっかりと締め付ける。
- (3)本品の気泡除去は、インジェクタを使用して行う。気泡を除去するため、接続部を軽く叩いてもよい。
- (4)本品のローテータ部をカテーテル等に接続する。
- (5)使用后、本品を廃棄する。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

本品をシリンジ等に接続する際、器具等を使用しないこと。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1)造影剤充填後に気泡が完全に除去されていることを確認すること。気泡除去が完了するまで患者をインジェクタに接続しないこと。
- (2)仕様で定められた耐圧を超過しないように注意すること。

2. 不具合・有害事象

<重大な有害事象>

本品を使用した造影剤注入装置による造影剤の注入時に以下のような有害事象がおこる可能性がある。

- ・空気塞栓
- ・造影剤等の血管外漏出

【保管方法及び有効期間等】

<有効期間>

3年[自己認証による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

バイエル薬品株式会社

TEL:06-6133-6250 FAX:06-6344-2395

外国製造業者

バイエルメディカルケア社(Bayer Medical Care, Inc.) (米国)